

SITSVÄSKA



SITSMONTERAD art.nr. 9900212




DYNMONTERAD art.nr. 9900213

Sitsväskan finns i två varianter, sitsmonterad eller dynmonterad.

- Den **sitsmonterade** fästs direkt mot sitsens kardborreband, och sitter sedan monterad på stolen.
- Den **dynmonterade** väskan sitter fäst i dynan, och följer med dynan när dynan tas ur stolen. Den levereras med ett löst självhäftande kardborreband som fästes mot dynans undersida. Sitsväskans kardborre fästs sedan mot denna. I bakkant fästs den med magneter mot ramens rör.

Båda sitsväskorna är identiska förutom infästningen

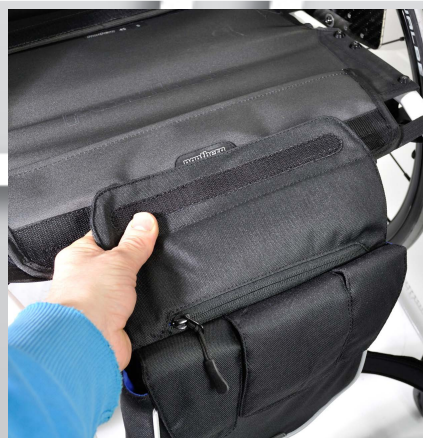


Montering av sitsmonterad väska mot sitsens kardborreband



Montering av den medföljande kardborrebandet på dynans undersida vid dynmonterad sitsväska. Fäst den dynmonterad sitsväskan mot det ditklistrade kardborrebandet.



Bakom dragkedjan så finns ett stort fack för förvaring av t.ex. nycklar m.m.

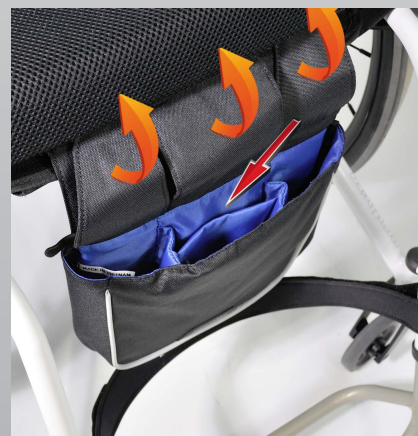

Lyfter man på de tre magnetfösedda flikarna finns det mer förvaringsutrymme för t.ex. mobiltelefon, plånbok m.m.



Använd sitsväskans inbyggda magneter för att fästa den mot ramrören vid körning.